

# ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Plus

Eenvoudig en veilig te gebruiken, overal.




## 1. Het steriele beschermkapje verwijderen

Draai en verwijder het steriele beschermkapje.

Gebruik de prikker niet wanneer het steriele beschermkapje reeds verwijderd is aangezien de steriliteit dan aangestast kan zijn.

Een ingebouwd veiligheidsmechanisme verzekert dat de prikker slechts eenmaal kan gebruikt worden. Aldus wordt onvrijwillig prikken vermeden.

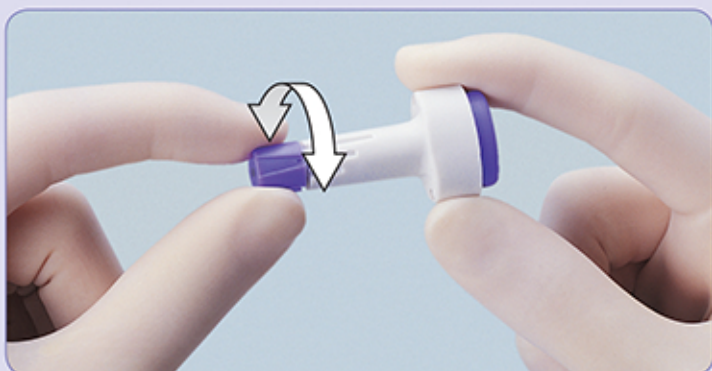

## 2. Selecteer de prikdiepte

Accu-Chek Safe-T-Pro Plus biedt 3 instelbare prikdieptes voor variabel bloedvolume en verschillende huidtypes.

Kies de gewenste diepte door aan de paarse ring te draaien.

De diepte is vooraf ingesteld op gemiddeld. Kies de gewenste prikdiepte steeds na het verwijderen van het steriele beschermkapje.



## 3. Een bloeddruppel bekomen

Duw de Accu-Chek Safe-T-Pro Plus prikker stevig tegen het te prikken huidoppervlak. Druk op de paarse knop en neem het bloed af.

Verantwoordelijke uitgever: Rob Geraerdt, Schaarbeeklei 198, 1800 Vilvoorde - April 2009

Voor meer informatie, gelieve de handleiding te raadplegen of bel gratis

0800 93 626



ACCU-CHEK, SAFE-T-PRO en LEVEN. ZOALS IK HET WIL zijn handelsmerken van een lid van de Roche Group.

© 2009 Roche Diagnostics

www.accu-chek.be  
Roche Diagnostics Belgium  
Schaarbeeklei 198  
1800 Vilvoorde

ACCU-CHEK®

Leven. Zoals ik het wil.